

TABELA DE DILUIÇÃO

Apresentamos abaixo, diluição recomendada do produto, bem como as informações que o cercam:

PRODUTO: **PEROXY 4D - DESINFETANTE HOSPITALAR NÍVEL INTERMEDIÁRIO**

MEDIDAS	LEVE: 1 PARA 250	MÉDIA: 1 PARA 100	PESADA: 1 PARA 25
BALDE 50 LITROS	200 ml	500 ml	2.000 ml
BALDE 30 LITROS	120 ml	300 ml	1.200 ml
BALDE 20 LITROS	80 ml	200 ml	800 ml
BALDE 10 LITROS	40 ml	100 ml	400 ml
BALDE 8 LITROS	32 ml	80 ml	320 ml
BALDE 5 LITROS	20 ml	50 ml	200 ml
BALDE 1 LITROS	4 ml	10 ml	40 ml

Instrução de uso:

Para limpeza e desinfecção de nível intermediário (eliminação de Clostridium difficile)

1. Diluir PEROXY 4D, na diluição recomendada (atentar-se ao nível de carga orgânica na superfície). 2. Aplicar a solução de produto, com auxílio de pano descartável, pano microfibrado ou fibra de limpeza. 3. Deixar agir por 10 minutos e 4. Enxaguar e secar, se houver necessidade. 1:25 (40 ml de produto para 1 litro de água)

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos: 1:100 (10 ml de produto para 1 litro de água)

Para limpeza de pisos: 1:250 (4 ml de produto para 1 litro de água)

Para limpeza e desinfecção de artigos de inaloterapia e assistência ventilatória:

1. Realizar uma pré lavagem em imersão com detergente neutro, detergente enzimático ou Peroxy 4D. Deixe agir por 5 minutos e realize ação mecânica com auxílio de escova de cerdas macias ou fibras de limpeza. Enxaguar com água limpa, 2. Imergir os artigos em uma nova solução de Peroxy 4D, deixando agir por 10 minutos e 3. Enxaguar com água limpa e secar os artigos 1:25 (40 ml de produto para 1 litro de água)

Propriedades:

PEROXY 4D é indicado para área hospitalar e todas as áreas que buscam por limpeza eficiente e desinfecção em uma única operação. Formulado à base de Quaternário de Amônio de 5ª geração e Peróxido de Hidrogênio, ativos bactericidas que proporcionam alto desempenho em um amplo espectro de microrganismos, elimina 99,999% de microrganismos da superfície.

O PEROXY 4D foi especialmente desenvolvido pensando nas dificuldades encontradas na área hospitalar em relação as bactérias super resistentes e surtos ocasionados por elas. Além disso, apresenta excelente relação custo benefício em aplicações de limpeza e desinfecção, nas mais diversas áreas, tais como, shoppings, cozinhas industriais, indústrias em geral, etc.

Em hospitais, PEROXY 4D é indicado para áreas críticas, tais como, centros cirúrgicos, centro obstétrico, UTI, UTI Neonatal, unidade de diálise, setor de hemodinâmica, unidade de transplante, unidade de queimados, unidade de isolamento, área suja da lavanderia, etc., em áreas semicríticas, tais como, enfermaria, apartamentos, ambulatórios, banheiros, central de triagem, etc., e em áreas não críticas, tais como, almoxarifados, vestiários e áreas administrativas. Indicado, também, para clínicas médicas, odontológicas e de estéticas.

É ideal para desinfecção de superfícies fixas, tais como, piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc., e artigos não críticos, tais como, termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

PEROXY 4D é um desinfetante de nível intermediário, indicado para artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. PEROXY 4D tem ação bactericida e bacteriostática, agindo com eficácia sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. PEROXY 4D possui laudos que comprovam sua ação de desinfecção contra as bactérias Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterococcus hirae e Escherichia coli, ao vírus SARS-CoV-2, a fungos Tricophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans e Candida auris, as bactérias multirresistentes, Acinetobacter baumannii produtora de Carbapenemase (Multirresistente), VRE, Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC) e Staphylococcus MRSA, aos tubérculos Mycobacterium bovis e Mycobacterium smegmatis, e aos esporos Clostridium difficile.



Glauco Serrão
Gerente Comercial
(92) 8169-6079
glauco@impolut.com.br



Av. Djalma Batista, 707 - São Geraldo



@impolutmanaus

| 3090-0010